

Kurzanleitung – COVID-19 Antigen Test

1. Nasenabstrich machen



- Führen Sie den Abstrichtupfer vorsichtig in das Nasenloch ein, welches am meisten Sekret absondert, bis Sie den Widerstand der Nasenmuschel spüren (Nicht mehr als 2,5 cm).
- Drehen Sie den Tupfer ein paar Mal gegen die Nasenwand.

2. Geben Sie 10 Tropfen Puffer in das Extraktionsröhrchen



3. Probe in Flüssigkeit lösen



- Abstrichtupfer in das Extraktionsröhrchen schieben und gegendie innere Wand ausdrücken.
- Nochmals vollsaugen lassen und erneut ausdrücken. Mehrere Male wiederholen.
- **2 Minuten stehen lassen**
- Abstrichtupfer nochmals ausdrücken und rausnehmen

4. Probeflüssigkeit auf die Kassette geben.

- Kappe auf das Extraktionsröhrchen drücken.
- **2 Tropfen Extraktionslösung** in die Probeöffnung der Testkassette geben.




5. 15 Minuten warten



- **Nicht länger als 15 Minuten** mit Ergebnis ablesen warten!!

6. Testergebnis ablesen

COVID-19 positiv:

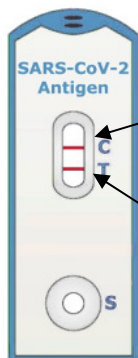


Kontrolllinie (C) bestätigt korrekten Ablauf des Tests

Testlinie SARS-CoV-2 (T)

Zwei farbige Linien (T+C) erscheinen im Sichtfenster

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie.

COVID-19 negativ:

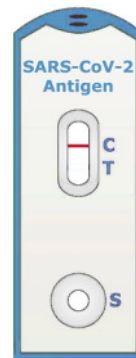

Eine farbige Linie (C) erscheint im Sichtfenster

Achtung: Innerhalb der Auswertungszeit von 15 Minuten ablesen!

Ungültiges Testergebnis:



Keine farbige Linie erscheint in der Kontrollregion (C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!