

# Guide rapide – COVID-19 Test antigène

## 1. Prélèvement nasal



- Introduisez l'écouvillon délicatement dans la narine qui a le plus de sécrétion, jusqu'à sentir une résistance du cornet nasal (pas plus de 2,5cm).
- Tournez l'écouvillon quelque fois contre la paroi nasale.

## 2. Donnez 10 gouttes de liquide-tampon dans le tube d'extraction.



## 3. Trempez l'échantillon dans le liquide-tampon



- Introduisez l'écouvillon dans le tube d'extraction, puis pressez-le contre la paroi intérieure.

- Arrêtez de presser et laissez-le se gorgier à nouveau de liquide. Pressez-le à nouveau contre la paroi. Répétez l'opération plusieurs fois.
- **Laissez reposer la solution pendant 2 minutes**
- Retirez l'écouvillon, en le pressant fermement contre la paroi du tube pour libérer autant de liquide que possible.

## 4. Pipetez le liquide contenant l'échantillon sur la cassette.

- Placez un embout à pipeter sur le tube.
- **Pipetez 2 gouttes de liquide** dans l'ouverture de la cassette.




## 5. Attendez 15 minutes.



- N'attendez **pas plus de 15 minutes** pour lire le résultat!!

## 6. Interprétation du test

### COVID-19 positif:

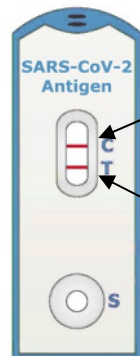


**Ligne de contrôle (C)**  
confirme le déroulement correct du test

**Ligne de test**  
SARS-CoV-2 (T)

**Deux lignes de couleur (T+C)** apparaissent dans la fenêtre de test.

Attention: L'intensité de la ligne de test peut être plus forte ou plus faible que la ligne de contrôle.


### COVID-19 négatif:

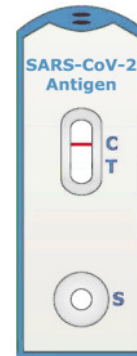

**Une ligne de couleur (C)** apparaît dans la fenêtre de test.

Attention: Lire le résultat à 15 minutes après l'exécution du test!

### Résultat non valable:

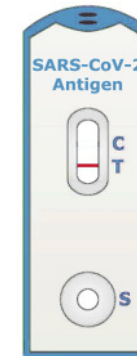

**Aucune ligne de couleur** n'apparaît dans la région de contrôle (C).

Le test n'est pas valable et doit être refait.