

# Kurzanleitung – Lyme/ Borreliose Schnelltest

## 1. Entweder:

<p><b>A. Serum oder Plasma</b></p> <p>Pipette bis hier mit Blut füllen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 µl Serum oder Plasma</li> <li>• 3 Tropfen Puffer (ca. 120 µl)</li> </ul>	<p><b>B. Venöses Vollblut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 µl Vollblut aus der Vene</li> <li>• 3 Tropfen Puffer (ca. 120 µl)</li> </ul>	<p><b>C. Kapillares Vollblut aus der Fingerkuppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 µl Vollblut aus der Fingerkuppe</li> <li>• 3 Tropfen Puffer (ca. 120 µl)</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


## 2. 10 Minuten warten



- **Nicht länger als 20 Minuten** mit dem Ergebnis ablesen warten!

## 3. Testergebnis ablesen

### Borreliose IgM positiv:

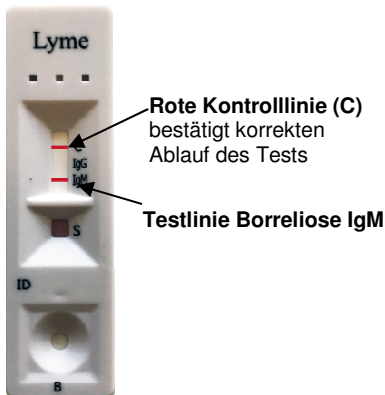

Eine rote Testlinie (IgM) und eine rote Kontrolllinie erscheinen im Sichtfenster

### Borreliose IgG positiv:




Eine rote Testlinie (IgG) und eine rote Kontrolllinie erscheinen im Sichtfenster

### Borreliose IgM + IgG positiv:



Zwei rote Testlinien (IgM und IgG) und eine rote Kontrolllinie erscheinen im Sichtfenster


### Borreliose negativ:

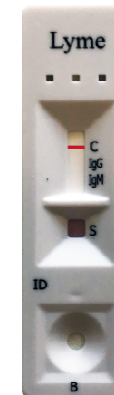

Nur eine rote Kontrolllinie erscheint in der Kontrollregion (C):

Achtung: Innerhalb der Auswertungszeit von 10 bis 20 Minuten ablesen!

### Ungültiges Testergebnis:

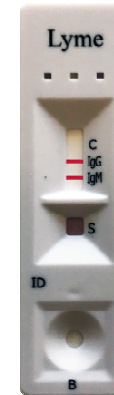

Keine rote Kontrolllinie erscheint in der Kontrollregion (C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!