


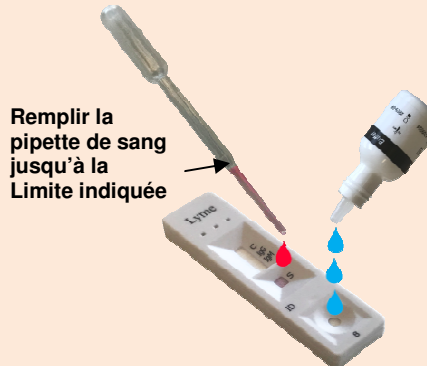


# Guide rapide – Borréliose de Lyme

## 1. Soit:

<p><b>A. Sérum ou plasma</b></p>  <p>Remplir la pipette de sang jusqu'à la Limite indiquée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 µl sérum ou plasma</li> <li>• 3 gouttes de tampon (env. 120 µl)</li> </ul>	<p><b>B. Sang total veineux</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 µl sang total provenant de la veine</li> <li>• 3 gouttes de tampon (env. 120 µl)</li> </ul>	<p><b>C. Sang total capillaire (bout du doigt)</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 µl sang total du bout du doigt</li> <li>• 3 gouttes de tampon (ca. 120 µl)</li> </ul>
---	--	--


## 2. 10 minutes d'attente

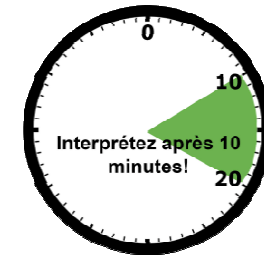

- **Ne pas attendre plus de 20 minutes** pour lire le résultat du test !


## 3. Interprétation du résultat

### Positif à la borréliose IgM:

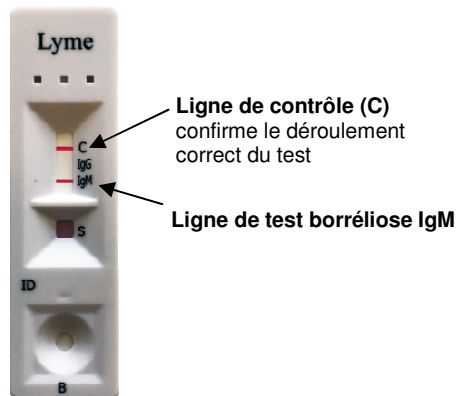

Une ligne de test rouge (IgM) et une ligne de contrôle rouge apparaissent dans la fenêtre de test

### Positif à la borréliose IgG:

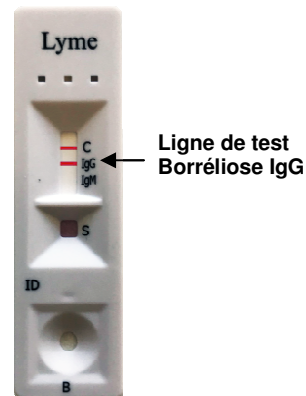


Une ligne de test rouge (IgG) et une ligne de contrôle rouge apparaissent dans la fenêtre de test

### Positif à la borréliose IgM et IgG:



Deux lignes de test rouges (IgM et IgG) et une ligne de contrôle rouge apparaissent dans la fenêtre de test


### Négatif à la borréliose:

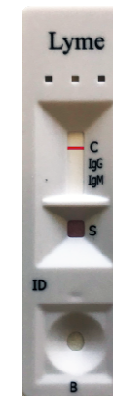

Apparition d'une seule ligne de contrôle (C) dans la fenêtre de test:

Attention: Lire le résultat entre 10 et 20 minutes après l'exécution du test!

### Résultat non valable:

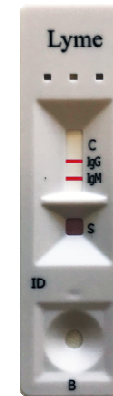

Aucune ligne n'apparaît dans la zone de contrôle (C). Le test n'est pas valable et doit être refait !