


# Kurzanleitung – COVID-19 Easy Antigen Test

## 1. Nasenabstrich machen



- Führen Sie den Abstrichtupfer vorsichtig in das Nasenloch ein bis Sie leichten Widerstand spüren (Nicht mehr als 2,5 cm) und drehen Sie den Tupfer **5 Mal** gegen die Nasenwand.
- **Wiederholen** Sie den Vorgang mit dem anderen Nasenloch

## 2. Füllen Sie den Puffer in das Extraktionsröhrchen

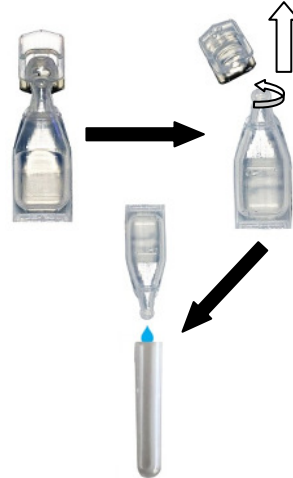

## 3. Probe in Flüssigkeit lösen



- Abstrichtupfer in das Extraktionsröhrchen schieben und gegen die innere Wand ausdrücken.
- Nochmals vollsaugen lassen und erneut ausdrücken. Mehrere Male wiederholen.
- **2 Minuten stehen lassen**
- Abstrichtupfer nochmals ausdrücken und rausnehmen

## 4. Probeflüssigkeit auf die Kassette geben.

- Kappe auf das Extraktionsröhrchen drücken.
- **3 Tropfen Extraktionslösung** in die Probeöffnung der Testkassette geben.




## 5. 10 - 20 Minuten warten



- **Nicht länger als 20 Minuten** mit Ergebnis ablesen warten!!

## 6. Testergebnis ablesen

### COVID-19 positiv:

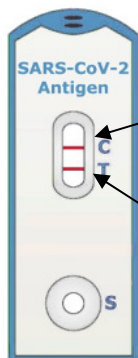


- **Kontrolllinie (C)** bestätigt korrekten Ablauf des Tests
- **Testlinie SARS-CoV-2 (T)**

**Zwei farbige Linien (T+C)** erscheinen im Sichtfenster

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie.


### COVID-19 negativ:

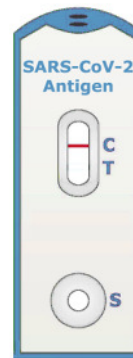

**Eine farbige Linie (C)** erscheint im Sichtfenster

Achtung: Innerhalb der Auswertungszeit von 20 Minuten ablesen!

### Ungültiges Testergebnis:

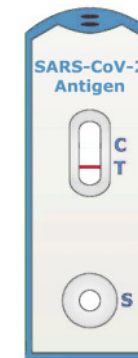

**Keine farbige Linie** erscheint in der Kontrollregion (C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!